

PROPISAN VAM JE EASYHALER

Ovaj je letak namijenjen osobama kojima je propisan Easyhaler za liječenje astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB).

ŠTO JE EASYHALER?

Easyhaler je inhalator za prašak za liječenje astme ili kronične opstruktivne plućne bolesti. Jednostavan je za upotrebu i ne sadržava potisna sredstva. Prašak udahnete u pluća putem usnika na inhalatoru. Easyhaler ima brojač doziranja koji vam jasno pokazuje koliko ima preostalih doza.

Easyhaler ima pet mogućnosti upotrebe.



Zaštita za usnik (kapica protiv prašine)
Zaštita za usnik (kapica protiv prašine) mora pokrivati usnik inhalatora. Kapica sprečava aktivaciju inhalatora.



Zaštitni omot
Easyhaler možete upotrebljavati sa zaštitnim omotom ili bez njega. Inhalator može biti u omotu prilikom udisanja.

**KAKO PUNITI I UPOTREBLJAVATI EASYHALER**

Važno je pažljivo pročitati sljedeće upute.

**1. PROTRESITE**

- Uklonite zaštitu za usnik (kapicu protiv prašine) s usnika.
- Umetnite Easyhaler u omot ako je zaštitni omot isporučen u pakiranju.
- Nekoliko puta protresite inhalator, držeći ga pritom u uspravnom položaju.

**2. KLIKNITE NA MJESTO**

- Držite Easyhaler uspravno između prsta i palca i pritisnite jednom dok ne začujete klik. Ostavite ga da se vrati u izvorni položaj, drugim riječima da 'klikne natrag'.
- Doza lijeka sada je spremna za udisanje.

**3. UDAHNITE**

- Normalno izdahnite.
- Cijeli usnik stavite u usta i objumite ga usnama kako ne bi došlo do propuštanja zraka. Duboku udahnite kroz inhalator.
- Uklonite usnik iz usta i pet sekundi zadržite dah, a zatim normalno dišite. Možete biti sigurni da ste primili dozu kada u ustima osjetite blagi slatkasti okus.

• Ponovite od koraka 1 ako vam je propisano više doza.

• Ako ste upotrijebili Beclomet, Salflumix, Bufomix ili Giona Easyhaler, nakon uzimanja doze uvijek isperite usta vodom uz grgotanje. Ispljunite vodu.

• Zaštitu za usnik (kapicu protiv prašine) ponovno postavite na usnik. Zatvorite zaštitni omot ako ga upotrebljavate. Ako ste slučajno pritisnuli Easyhaler bez udisanja oslobođene doze, ispraznite Easyhaler tako da usnik blago udarite o dlan ili stol.



EASYHALER JE JEDNOSTAVAN ZA ODRŽAVANJE

Usnik inhalatora očistite čistom, suhom krpom najmanje jednom tjedno.



KAKO ZNATI KADA JE INHALATOR PRAZAN?

Easyhaler ima brojač doziranja koji vam jasno pokazuje koliko ima preostalih doza. Odbrojavanje svaku petu dozu, a brojevi se prikazuju u intervalima od 10 doza. Kada se prikažu brojevi na crvenoj pozadini, preostalo je još 20 doza. Zamijenite inhalator kada brojač dođe do 0, čak i ako kroz prozorčić na stražnjoj strani inhalatora još ima vidljivog praška.

ČUVANJE I SKLADIŠTENJE EASYHALERA

Bufomix Easyhaler može se čuvati 4 mjeseca nakon otvaranja laminirane vrećice. Salflumix 50/250 mikrograma može se čuvati mjesec dana, a 50/500 mikrograma 2 mjeseca. Buventol, Giona i Beclomet Easyhaleri mogu se čuvati 6 mjeseci.

Easyhaler je potrebno čuvati na sobnoj temperaturi i suhom mjestu. Dostupan je s omotom i bez njega. Omot se može upotrijebiti kao dodatna zaštita inhalatora (za više informacija vidjeti uputu o lijeku).

OLAKŠAVAJUĆE LIJEČENJE BRONHODILATATOROM:




BUVENTOL EASYHALER

Buventol Easyhaler sadržava salbutamol koji širi bronhe i olakšava disanje. Brzo djeluje i upotrebljava se za ublažavanje simptoma astme ili za olakšavanje disanja tijekom kronične opstruktivne plućne bolesti. Učinak nastupa unutar nekoliko minuta i traje oko 4-6 sati.

Buventol Easyhaler dostupan je u dvije različite jačine, 100 mikrograma/doza i 200 mikrograma/doza.

PREVENTIVNO/PROTUUPALNO LIJEČENJE:

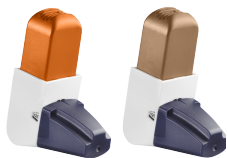

GIONA EASYHALER I BECLOMET EASYHALER

Giona Easyhaler contains budesonide, and the Beclomet Easyhaler contains beclomethasone. Giona Easyhaler sadržava budezonid, a Beclomet Easyhaler sadržava beklometazon.

Oba pripadaju skupini lijekova poznatih pod nazivom kortikosteroidi i upotrebljavaju se za terapiju održavanja i preventivno liječenje kod astme. Giona Easyhaler i Beclomet Easyhaler smanjuju i sprečavaju upalu u bronhima i moraju se redovito upotrebljavati za sprečavanje simptoma astme, čak i kad nema simptoma. Učinak postaje uočljiv nakon nekoliko dana, a puni učinak postiže se nakon nekoliko tjedana liječenja.

Giona Easyhaler dostupan je u tri jačine, 100 mikrograma/doza, 200 mikrograma/doza i 400 mikrograma/doza. Beclomet Easyhaler dostupan je u jačini od 200 mikrograma/doza.

PREVENTIVNO/OLAKŠAVAJUĆE LIJEČENJE:



BUFOMIX EASYHALER

Bufomix Easyhaler sadržava dva različita lijeka: budezonid i formoterol. Budezonid pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom kortikosteroidi i upotrebljava se za terapiju održavanja. Smanjuje i sprečava oticanje i upalu u plućima. Formoterol širi bronhe i olakšava disanje.

Do učinka formoterola dolazi unutar 1 do 3 minute nakon udisanja i u prosjeku traje 12 sati nakon uzimanja jedne doze.

Bufomix Easyhaler dostupan je u tri jačine budezonida/formoterola: 80/4,5 mikrograma, 160/4,5 mikrograma i 320/9 mikrograma.

PREVENTIVNO LIJEČENJE:



SALFLUMIX EASYHALER

Salflumix Easyhaler sadržava dva različita lijeka: salmeterol i flutikazon. Flutikazon pripada skupini lijekova poznatih pod nazivom kortikosteroidi i upotrebljava se za prevenciju. Smanjuje i sprečava oticanje i upalu u plućima. Salmeterol širi bronhe i olakšava disanje. Do učinka salmeterola dolazi unutar 1 do 3 minute nakon udisanja i u prosjeku traje 12 sati nakon uzimanja jedne doze.

Salflumix Easyhaler dostupan je u dvije različite jačine salmeterola/flutikazona: 50/250 mikrograma i 50/500 mikrograma.

Uvijek se pridržavajte uputa na receptu koji ste dobili. Pažljivo pročitajte uputu o lijeku. U slučaju bilo kojih pitanja ili nedoumica u vezi liječenja, obratite se liječniku ili medicinskoj sestri. Za više informacija posjetite www.fass.se, odjeljak namijenjen općoj javnosti. Lijekove nikada nemojte bacati s otpadom iz kućanstva. Mislite na okoliš. Neiskorišteni lijekovi mogu se predati u ljekarni.